

Produkt

Würfel-Pessar RV (vakuumreduziert)

Thema/ Produktbeschreibung

Durch die Evolution des aufrechten Gangs ist der Beckenboden des Menschen den Wirkungen der Schwerkraft ausgesetzt. Besonders betroffen davon ist der Beckenboden der Frau. Deshalb zählt die Genitalsenkung zu den häufigsten Krankheitsbildern in der Frauenheilkunde.

Die Wahrscheinlichkeit, an einem so genannten Genitaldeszensus zu erkranken, steigt mit zunehmendem Lebensalter. Faktoren wie Mangel an weiblichen Hormonen, Adipositas, schweres körperliches Arbeiten, Ernährungsgewohnheiten, genetisch bedingte Gewebsschwäche erhöhen das Risiko.

Die konservative Behandlung der Genitalsenkung, die ambulant durchgeführt wird, umfasst unter anderem die Hormontherapie, die Beckenbodengymnastik, Reizstrom und die Verwendung von Pessaren. Bis heute sind Würfel-Pessare unübertroffen, vor allem in der Selbstbehandlung. Durch ihre gute Haftfähigkeit und ihre sehr einfache Anwendung sind Würfel-Pessare für die meisten Formen der Genitalsenkung einsetzbar.

Durch die Löcher im Silikon wird das Vakuum reduziert, wodurch eine leichtere Entfernung des medesign Würfel Pessars ermöglicht wird. Die nach innen gewölbten Flächen des Würfel-Pessars saugen sich an der Scheidenwand fest und die Kanten des Würfels stützen das Gewebe. Der medesign Pessar repositioniert die Organe in die anatomisch richtigen Lage und wirkt dem Vorfall bzw. der Senkung von Scheide, Gebärmutter, Blase oder Darm entgegen.



Anwendung

Das Würfel Pessar wird morgens von der Patientin selbst eingelegt und abends wieder entfernt. Die im Verhältnis zu Ringpessaren kleinen Würfel können leicht eingeführt und mit Hilfe des Zugfadens wieder entfernt werden. Die nächtliche Entlastung der Schleimhaut und des Beckengewebes stellt einen wesentlichen Vorteil gegenüber allen anderen Pessarformen dar.

Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisch Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

Inhalt

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

Produktdaten

Artikelbezeichnung	Größe	Artikelnummer	EAN Code
Würfel-Pessar RV	Gr. 0 / 25mm	MED1000645	4250201201775
Würfel-Pessar RV	Gr. 1 / 29mm	MED1000644	4250201201782
Würfel-Pessar RV	Gr. 2 / 32mm	MED1000643	4250201201799
Würfel-Pessar RV	Gr. 3 / 37mm	MED1000642	4250201201805
Würfel-Pessar RV	Gr. 4 / 41mm	MED1000641	4250201201812
Würfel-Pessar RV	Gr. 5 / 45mm	MED1000640	4250201201829
Würfel-Pessar RV	Gr. 6 / 55 mm	MED1000949	4250201201836
Würfel-Pessar RV	Gr. 7 / 65 mm	MED1000950	4250201201843
Würfel-Pessar RV	Gr. 8 / 70 mm	MED1000951	4250201201850
Würfel-Pessar RV	Gr. 9 / 75 mm	MED1001177	4250201201867

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &
Sales\Produktbeschreibungen_freigegeben\wuerfelpessar_rv.doc

Stand 23.08.2011
Freigegeben am: