

Produkt**T-Pessar Typ B****Thema/
Produktbeschreibung**

Beckenbodendefekte der Frau sind oft eine Kombination aus Cystozele, Enterozele und Rektozele. Eine Cystozele tritt auf, wenn die sehr dünne Wand zwischen Blase und Scheide zu schwach geworden ist, und die Blase teilweise in die Scheide sinkt. Dadurch ist eine komplette Entleerung der Blase nicht mehr möglich, und in den meisten Fällen liegt auch eine Stressinkontinenz vor.



Das **T-Pessar Typ B** wurde speziell zur Behandlung von Cystozelen und Rektozelen entwickelt. Die zylindrische Form mit den Vertiefungen in der Oberfläche repositioniert die Blase in die anatomisch richtige Lage. Durch die Vertiefungen in der Oberfläche saugt sich das T-Pessar an die Scheidenwand an, und stabilisiert so die Scheide.

**Anwendung/
Zubereitung**

Das T-Pessar kann von der Frau leicht eingeführt und mit Hilfe des Rückholfadens entfernt werden. Durch die verschiedenen Größen ist eine individuelle Anpassung möglich. Die speziell gestaltete Oberfläche vermeidet weitestgehend Druckstellen im Schleimhautbereich.

Speziell bei körperlicher Belastung, wie z.B. schwerer Arbeit, Sport u.s.w. hält der T-Pessar Blase und Darm in der anatomisch richtigen Lage.

Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisch Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

Inhalt

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

Produktdaten

Artikelbezeichnung	Größe: Maße breite x länge	Artikelnummer	EAN Code
T-Pessar Typ B	Gr. 1: B 20 x L 53 mm	MED1001649	4250201207357
T-Pessar Typ B	Gr. 2: B 25 x L 59 mm	MED1001640	4250201207289
T-Pessar Typ B	Gr. 3: B 32 x L 78 mm	MED1001650	4250201207364
T-Pessar Typ B	Gr. 4: B 36 x L 78 mm	MED1001727	4250201208002
T-Pessar Typ B	Gr. 5: B 42 x L 78 mm	MED1001728	4250201208019
T-Pessar Typ B	Gr. 6: B 46 x L 81 mm	MED1001729	4250201208026
T-Pessar Typ B Anpassset (MP Kl I)	Gr. 2,3,4 und 5	MED1001733	4250201208071

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &
Sales\Produktbeschreibungen_freigegeben\tpessar_typ_b.doc

Stand 03.08.2011
Freigegeben am:03.08.2011



medesign I. C. GmbH Dietramszeller Str. 6 D-83623 Dietramszell
Phone: ++49-8027-90738-0 Fax: ++49-8027-90738-27
email: info@medesign.de internet: www.medesign.de